

BioDrop MD®

Säilöntäaineeton, steriili, kostuttava ja voiteleva silmätipa, 0,2 % hyaluronaani

Mikä tämä on ja mihin sitä käytetään

Tämä on lievien ja keskivaikeiden kuivasilmäisyyden oireiden lievittämiseen tarkoitettu kostutustippa. Hyaluronaanin kostuttavat ja suojaavat ominaisuudet helpottavat erilaisten ympäristötekijöiden kuten kuivan ilman, tuulen, tupakansavun, ilmansaasteiden, voimakkaan valon, näyttöpäätetyöskentelyn tai silmäleikkauksen sekä piilolinssien käytön aiheuttamia kuivasilmäisyyden oireita: kirvelyä, kutinaa ja roskan tunnetta silmässä. Silmätipan koostumus tasapainottaa kyynelnestettä ja säilöntäaineettomana se sopii erityisen hyvin herkkäsilmäisille ja toistuvaan käyttöön. Voidaan käyttää ennen piilolinssien silmiin laittamista sekä linssien käytön aikana.

Käyttöohjeet

Poista korkin sinetti avataksesi pullon ensimmäistä kertaa. Avaa korkki. Harjoittele pullon käsittelyä ennen ensimmäistä käyttöä. Purista pulloa ainoastaan annostelukärki alaspäin. Laita 1–2 tippaa silmiin 2–3 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan. Voit myös laittaa 1 tipan piilolinssille ennen sen asettamista silmään sekä piilolinssin käytön aikana tarpeen mukaan. Sulje korkki heti käytön jälkeen. Sisältö tulee käyttää kuuden (6) kuukauden kuluessa avaamisesta ja viimeiseen käyttöpäivään mennessä.

Varoituksia

- Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin sen aineosalle.
- Älä käytä tuotetta, jos pullo on vioittunut.
- Yhtä kostutustippapulloa tulee käyttää vain yksi käyttäjä.
- Älä kosketa avatun tippapullon kärjellä silmää tai piilolinssiä kontaminaatioiden välttämiseksi. Älä koskettele sormilla tippapullon kärkeä.
- Älä puristele pulloa korkin ollessa päällä.
- Älä käytä tuotetta pullossa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen tai yli kuusi kuukautta avaamisesta.
- Heti tippojen laittamisen jälkeen näkö voi hetkellisesti sumentua. Odota näön tarkentumista ennen kuin lähdet liikkeelle.
- Pidä vähintään 10–15 minuutin väli mahdollisen silmälääkkeen laittamisen kanssa.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Säilytä 5–30 °C:een lämpötilassa.
- Hävitä tyhjä pullo asianmukaisesti.

Koostumus

0,2 % hyaluronaani steriilissä isotonisessa, vähäfosfaattisessa puskuriliuoksessa. Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia.

Viimeisin päivitys: syyskuu 2018



Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto. www.piilokset.fi

