

## Säilöntäaineeton, steriili, kostuttava ja voiteleva silmätipa, 2,0 % trehaloosi ja 0,25 % hyaluronaani

### Mikä tämä on ja mihin sitä käytetään?

silmätippa soveltuu hyvin myös herkkäsilmäisille ja piilolinssien käyttäjille. Trehaloosi ja hyaluronaani yhdessä kosteuttavat, voitelevat ja tasapainottavat kyynelkalvoa sekä suojaavat silmää kuivumiselta ja soluvaurioilta. Säännöllinen käyttö helpottaa erilaisten ympäristötekijöiden kuten kuivan ilman, tuulen, tupakansavun, ilmansaasteiden, voimakkaan valon, näyttöpäätetyöskentelyn tai silmäleikkauksen sekä piilolinssien käytön aiheuttamia kuivasilmäisyyden oireita: kirvelyä, kutinaa ja roskan tunnetta silmässä. Sopii pitkäaikaiseen ja toistuvaan käyttöön. Suomessa kehitetty ja valmistettu lääkinnällinen tuote

### Käyttöohjeet

Harjoittele pullon käsittelyä ennen ensimmäistä käyttöä. Purista pulloa ainoastaan annostelukärki alaspäin. Laita 1–2 tippaa silmiin 1–3 kertaa päivässä tarpeen mukaan. Poista korkin sinetti ensimmäistä kertaa pulloa avatessasi. Avaa korkki, kun olet laittamassa kostutustippoja ja laita korkki välittömästi takaisin pullon suulle silmätippojen laiton jälkeen. Voit käyttää silmätippoja myös piilolinssien käytön aikana.

### Varoitukset

- Älä käytä tuotetta, jos olet yliherkkä jollekin sen aineosalle.
- Älä käytä tuotetta, jos pullo on vioittunut.
- Yhtä silmätippulla tulee käyttää vain yksi käyttäjä.
- Älä kosketa avatun tippapullon kärjellä silmää tai piilolinssiä kontaminaatioiden välttämiseksi. Älä koskettele sormilla tippapullon kärkeä.
- Älä puristele pulloa korkin ollessa päällä.
- Käytä kuuden (6) kuukauden kuluessa ensimmäisestä avaamisesta ja viimeiseen käyttöpäivään mennessä.
- Silmään laittamisen jälkeen tipat voivat aiheuttaa hetkellistä näön sameutta. Odota näön tarkentumista ennen kuin lähdet liikkeelle.
- Pidä vähintään 10–15 minuutin väli mahdollisen silmälääkkeen laittamisen kanssa.
- Säilytä 15–30 °C lämpötilassa, suoja pullo jäätymiseltä ja auringonvalolta.
- Hävitä tyhjä pullo asianmukaisesti.
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

### Koostumus

2,0 % trehaloosi, 0,25 % hyaluronaani sterilissä isotonisessa, vähäfosfaattisessa puskuriliuoksessa. Ei sisällä eläinperäisiä ainesosia.



Oy Finnsusp Ab, Pääskykalliontie 5, 21420 Lieto. [www.piiliset.fi](http://www.piiliset.fi)

Viimeisin päivitys: 9/2019

