

MIKÄ TÄMÄ ON JA MIHIN SE ON TARKOITETTU Suomalainen all-in-one hoitoneste kaikkien pehmeiden ja silikonihydrogeelipiilolinssien puhdistukseen, desinfiointiin, säilytykseen ja huuhteluun. Hoitonesteen sisältämä biologinen puhdistusaine lisää desinfektioitehoa ja poistaa päivittäin käytettynä proteiinit ja lipidit.

KÄYTTÖOHJE

Piilolasit on puhdistettava, huuhdeltava ja desinfioitava päivittäin. Tämä estää mikrobien ja epäpuhtauksien tarttumisen linssihin.

1. Pese, huuhtelee ja kuivaa kätesi huolellisesti.
2. Poista linssi oikeasta silmästä ja aseta se kämmenelle.
3. Tiputa muutama pisara all-in-one nestettä linssille ja hiero linssiä varovasti sormella molemmilta puolilta 10–15 sekunnin ajan.
4. Huuhtelee linssi huolellisesti tuoreella nesteellä. Parhaaseen lopputulokseen pääset, kun toistat toimenpiteen. Aseta linssi säilytyskoteloon. Toista samat toimenpiteet toiselle linssille.
5. Täytä kotelo merkkiviivaan asti tuoreella all-in-one hoitonesteellä. Säilytä ja desinfioi linssit tuoreessa nesteessä vähintään neljä tuntia tai yön yli. Huuhtelee piilolinssit tuoreella hoitonesteellä aina ennen käyttöönottoa. Ottaessasi linssit käyttöön tyhjennä kotelo, huuhtelee se tuoreella hoitonesteellä ja anna kuivua.

TÄRKEÄÄ Piilolinssien turvallinen käyttö edellyttää käyntiä optikolla tai silmälääkärillä. Noudata tarkoin näitä käyttöohjeita sekä optikon tai silmälääkärin antamia erityisohjeita piilolinssien turvalliseen käyttöön ja hoitoon.

- Mikäli silmissäsi ilmenee ärsytystä tai jatkuvia vaivoja, keskeytä piilolasien käyttö ja ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.
- Poista korkin turvarengas pullon ensimmäisen avaamisen yhteydessä. Älä käytä hoitonestettä mikäli pullo tai turvarengas on vaurioitunut.
- Älä kosketa pullon suuosaa, näin nesteeseen ei pääse epäpuhtauksia.
- Käytä pullosta ottamaasi nesteannosta vain kerran.
- Sulje pullo huolellisesti heti käytön jälkeen ja säilytä huoneenlämmössä (15–30 °C).
- Älä yhdistä all-in-one nestettä mihinkään toiseen nesteeseen. Ei ole suositeltavaa vaihtaa hoitonestemerkkiä kesken piilolinssien käyttövälin.
- Älä siirrä all-in-one nestettä toiseen astiaan.
- Älä käytä vesijohtovettä piilolinssien tai linssikotelon käsittelyssä koska veden mikro-organismit voivat kiinnittyä linssiin ja aiheuttaa silmävaurioita.
- Mikäli piilolinssien käyttöväli on yli kaksi viikkoa, desinfioi linssit tuoreella hoitonesteellä ennen käyttöönottoa (katso kohta 5).
- Huolehdi piilolinssikotelon puhtaudesta ja vaihda se säännöllisesti uuteen. Huuhtelee linssikotelo tuoreella all-in-one hoitonesteellä ja anna sen kuivua avoimena.
- Säilyvyys neljä kuukautta avaamisesta. Käytettävä viimeiseen käyttöpäivään mennessä (katso leimaa pullossa).
- Suojaa pullo jäätymiseltä ja auringonvalolta. Ei lasten ulottuville.

KONTRAIKKAATIOT Älä käytä mikäli olet allerginen jollekin aineosalle.

KOOSTUMUS Dinatrium EDTA, biologinen puhdistusaine, polyheksanidi 0,0001 %, natriumboraatti ja natriumkloridi steriilissä puskuroidussa liuoksessa.

Tekstin viimeisin päivitys: 10/2017

